



EASY FLEXIBLE SINUS CURETTE

KOREA



- 1) #7091F 큐렛으로 측벽창주변의 상악동막을 조심스럽게 박리한다.
- 2) #7092F 큐렛으로 mesial wall, floor, distal wall의 순으로 상악동막의 박리를 깊게 진행한다. 이때 큐렛의 tip이 bone에 접촉을 유지해야 한다.
- 3) #7092F 큐렛으로 mesial 과 distal wall에 접근이 제한되는 경우 #7093F, #7094F 큐렛으로 박리를 시행한다.
- 4) 상악동의 medial wall까지 충분히 상악동 막을 박리해야 한다.