

EASY EXTRACTION BASIC KIT

이지 익스트랙션 베이직 키트 KOREA



[Easy 발치 세트 사용법]

1. <EASY PERIOTOME> periotide으로 치근 상부의 circumferential PDL을 cutting 한다
2. <EASY PERIOTOME> periotide를 치근 근심부에 삽입하면 부드러운 malleting을 시행한다.
치아의 탈구를 느끼면서 치근단 방향으로 periotide를 진입시킨다.
3. <EASY PERIOTOME> 저항감이 느껴지면 periotide를 협설축으로 흔들어 제거한다.
(중요: periotide의면에 지나친 힘을 가할 경우, 기구가 파절될 수 있다.)
4. <EASY PERIOTOME> periotide를 치근 원심부에 삽입하여 malleting을 시행하고 치근단방향으로 진입시킨다.
5. <EASY PERIOTOME> 치아의 탈구가 충분히 느껴지면 periotide를 제거한다.
6. <EASY PERIOTOME> 치아의 탈구가 부족하면 근심/원심쪽에서 추가적 malleting을 시행한다.
7. <EASY LUX> 치근에 잘 적합되는 lux를 선택한 뒤 근심협축 혹은 원심협축에서 luxation을 시행한다.
8. <EASY FORCEP> forcep으로 치은 연하 치근을 잡고 협설 운동 및 회전력을 가하여 최종 발치를 완료한다.

[주의사항]

1. 폐리오톰을 치근내에서 지나치게 구부릴 경우 파절될 수 있다.
2. 발치 시 Malleting을 시행할 때, 3mm 이상의 EASY periotide를 사용해야 한다.
본 세트에는 3mm의 periotide이 포함되어 있다.
3. Lux보다 큰 힘이 필요할 때는 Elevator를 사용해야 한다.