

한 글



MICRO BONE SCRAPER

www.dentalstudio.co.kr

㈜덴탈스튜디오

제조자
경기도 안양시 동안구 엘엑스로 136, 지하1층 비101호,
비102호, 비125호 (호계동, 금정역2차에스케이비이1타워)
Tel. 031-8069-7007 / Fax. 031-8069-7009

- 품목명 : 수동식의료용골
- 모델명 : 3500-1
- 품목허가번호 : 제신 24-892 호
- 포장단위 : 1Pack (2ea in case)
- 본 제품은 일회용 의료기기입니다.

사용 목적

뼈 등의 단단한 조직을 절단하거나 조정하기 위해 사용하는 수동식
기구

제품 특징

1. Blade
- 열처리가 되어 있어 날이 쉽게 무디어지지 않습니다.
2. Chamber
- 작은 사이즈로 좁은 공간에서 사용 할 수 있습니다.
3. Body
- 무게를 줄인 가벼운 디자인으로 설계 되어 있습니다.

* 특징 *

1. 내부 고정 장치로 인한 쉬운 조작.
2. 작은 사이즈 인한 좁은 공간 접근 가능.
3. 기존 제품에 비해 가벼운 디자인 설계로 인한 시술자의 편안
함과 피로도 감소.

사용 방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 전문의만 사용한다.
- 2) 시술자는 제품에 대한 사용방법 및 사용 시 주의사항을 완전히
숙지한 후 사용해야 한다.
- 3) 시술하기 전 수술 부위와 목적에 적합한 제품을 선택하여 준비
한다.
- 4) 시술하기 전에 제품의 손상여부와 세척 및 멸균여부 등의 상태
를 확인한다.
- 5) 일회용 비멸균 제품이므로 병원 자체 세척 및 멸균방법에 따르
거나, 아래의 세척 및 멸균 조건에 따라 멸균하여 준비한다.
 - 세척방법 : 사용 전 기구를 증류수 및 알코올을 이용하여 소독
및 세척 후, 완전하게 건조 시킨다.
 - 멸균조건 : 고압증기멸균 132℃에서 15분간 멸균 후, 30분
건조

나. 사용방법

- 1) 작용부(Blade)에 흠(흠) 부분이 골 방향으로 향하도록 기구를 잡
는다.
- 2) 제품의 작용부(Blade)를 시술 부위에 위치시킨다.
- 3) 과도한 힘을 사용하지 않도록 주의하며 손잡이 방향으로 당기
듯이 골 등의 단단한 조직을 절단 및 조정하는데 사용한다.
- 4) 시술 후, 절단된 잔여 골 조직들은 작용부(Blade)의 흠(흠) 부분
으로 저장되며 이는 계폐부를 시계 반대 방향으로 돌린 후, 밀

어주어 골 조직을 제거한다.

- 다. 사용 전 보관 및 관리방법
실온의 건조한 장소에 보관하도록 합니다.

사용 시 주의사항

본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용 할 수
있다.

가. 주의사항

- 1) 시술자는 제품에 대한 사용방법 및 주의사항을 완전히 숙지 후
사용해야 하며, 충분한 교육을 받거나 숙련된 시술자만이
사용해야 합니다.
- 2) 본 제품은 사용목적 이외의 용도로 사용해서는 안 됩니다.
- 3) 비멸균 제품이므로 사용 전에 반드시 세척 및 멸균하여 사용합
니다.
- 4) 무리하게 힘을 줄 경우, 파손될 수 있으므로 주의하여 사용한
다.

나. 경고

- 1) 제품의 사용 목적 이외 용도로 사용하거나 제품을 변형하여
사용하지 않습니다.
- 2) 기타 수술에 적합하지 않은 환자에게는 사용하지 않습니다.
- 3) 제품의 손상이나 변형을 방지하도록 주의 깊게 취급해야
합니다.

다. 부작용

제품의 사용 및 보관 등에 의한 부작용으로 인한 감염 및 금속
알레르기 등의 반응을 일으킬 수 있습니다.

IFU-DSI-3500-1-R00/ 24-07-18