

한글



MICRO BONE SCRAPER

www.dentalstudio.co.kr

㈜덴탈스튜디오

경기도 안양시 동안구 엘레스로 136, 지하1층 비101호, 비102호, 비125호 (호계동, 금정역2차에스케이브이1타워)
Tel. 031-8069-7007 / Fax. 031-8069-7009

☐품목명 : 수동식의료용골

☐모델명 : 3500-1

☐품목허가번호 : 제신 24-892 호

☐포장단위 : 1Pack (2ea in case)

☐본 제품은 일회용 의료기기 입니다.

사용 목적

뼈 등의 단단한 조직을 절단하거나 조정하기 위해 사용하는 수동식기구

제품 특징

1. Blade
- 열처리가 되어 있어 날이 쉽게 무디어지지 않습니다.

2. Chamber
- 작은 사이즈로 좁은 공간에서 사용 할 수 있습니다.

3. Body
- 무게를 줄인 가벼운 디자인으로 설계 되어 있습니다.

★ 특징 ★

1. 내부 고정 장치로 인한 쉬운 조작.

2. 작은 사이즈 인한 좁은 공간 접근 가능.

3. 기존 제품에 비해 가벼운 디자인 설계로 인한 시술자의 편안함과 피로도 감소.

사용 방법

가. 사용 전 준비사항

1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 전문의만 사용한다.

2) 시술자는 제품에 대한 사용방법 및 사용 시 주의사항을 완전히 숙지한 후 사용해야 한다.

3) 시술하기 전 수술 부위와 목적에 적합한 제품을 선택하여 준비한다.

4) 시술하기 전에 제품의 손상여부와 세척 및 멸균여부 등의 상태를 확인한다.

5) 일회용 비멸균 제품이므로 병원 자체 세척 및 멸균방법에 따르거나, 아래의 세척 및 멸균 조건에 따라 멸균하여 준비한다.
- 세척방법 : 사용 전 기구를 증류수 및 알코올을 이용하여 소독 및 세척 후, 완전하게 건조 시킨다.
- 멸균조건 : 고압증기멸균 121℃에서 30 분간 멸균 후, 30분 건조

나. 사용방법

1) 작용부(Blade)에 흠(흠) 부분이 골 방향으로 향하도록 기구를 잡는다.

2) 제품의 작용부(Blade)를 시술 부위에 위치시킨다.

3) 과도한 힘을 사용하지 않도록 주의하며 손잡이 방향으로 당기듯이 골 등의 단단한 조직을 절단 및 조정하는데 사용한다.

4) 시술 후, 절단된 잔여 골 조직들은 작용부(Blade)의 흠(흠) 부분으로 저장되며 이는 계폐부를 시계 반대 방향으로 돌린 후, 밀

어주어 골 조직을 제거한다.

다. 사용 전 보관 및 관리방법

실온의 건조한 장소에 보관하도록 합니다.

사용 시 주의사항

본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용 할 수 있다.

가. 주의사항

1) 시술자는 제품에 대한 사용방법 및 주의사항을 완전히 숙지 후 사용해야 하며, 충분한 교육을 받거나 숙련된 시술자만이 사용해야 합니다.

2) 본 제품은 사용목적 이외의 용도로 사용해서는 안 됩니다.

3) 비멸균 제품이므로 사용 전에 반드시 세척 및 멸균하여 사용합니다.

4) 무리하게 힘을 줄 경우, 파손될 수 있으므로 주의하여 사용한다.

나. 경고

1) 제품의 사용 목적 이외 용도로 사용하거나 제품을 변형하여 사용하지 않습니다.

2) 기타 수술에 적합하지 않은 환자에게는 사용하지 않습니다.

3) 제품의 손상이나 변형을 방지하도록 주의 깊게 취급해야 합니다.

다. 부작용

제품의 사용 및 보관 등에 의한 부작용으로 인한 감염 및 금속 알레르기 등의 반응을 일으킬 수 있습니다.

IFU-DS-I-3500-1(Rev.2)/ 26-08-26