

한글



TISSUE BONE SCRAPER

www.dentalstudio.co.kr

㈜덴탈스튜디오

제조사
경기도 안양시 동안구 엘레스로 136, 지하1층 비101호,
비102호, 비125호 (호계동, 금정역2차에스케이비이1타워)
Tel. 031-8069-7007 / Fax. 031-8069-7009

- 품목명 : 수동식의료용골
- 모델명 : 3500TK15/ 3500TK25
- 품목허가번호 : 제신 24-892 호
- 포장단위 : 1Pack (2ea in case)
- 본 제품은 일회용 의료기기 입니다.

사용 목적

뼈 등의 단단한 조직을 절단하거나 조정하기 위해 사용하는 수동식
기구

사용 방법

- 가. 사용 전 준비사항
- 1) 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 전문의만 사용한다.
 - 2) 시술자는 제품에 대한 사용방법 및 사용 시 주의사항을 완전히 숙지한 후 사용해야 한다.
 - 3) 시술하기 전 수술 부위와 목적에 적합한 제품을 선택하여 준비한다.
 - 4) 시술하기 전에 제품의 손상여부와 세척 및 멸균여부 등의 상태를 확인한다.
 - 5) 일회용 비멸균 제품이므로 병원 자체 세척 및 멸균방법에 따르거나, 아래의 세척 및 멸균 조건에 따라 멸균하여 준비한다.
 - 세척방법 : 사용 전 기구를 증류수 및 알코올을 이용하여 소독 및 세척 후, 완전하게 건조 시킨다.
 - 멸균조건 : 고압증기멸균 121℃에서 30분간 멸균 후, 30분 건조

- 나. 사용방법
- 1) 용도에 적합한 제품을 선택합니다.
 - 2) 채취 부위 상악 구개측 국소 마취를 합니다.
 - 3) 제품의 작용부(Blade)를 상악 구치부 시술 부위에 위치시킨다.
 - 4) 제품을 가볍게 누른 상태로 후방에서 전방으로 이동 시킨다.
 - 5) 구개측 상피를 1.0 ~ 2.0mm 두께를 유지하며 거상한다.

- 다. 사용 전 보관 및 관리방법
- 실론의 건조한 장소에 보관하도록 합니다.

사용 시 주의사항

- 본 제품은 의료기기이므로 전문 교육을 받은 자만이 사용 할 수 있다.
- 가. 주의사항
- 1) 시술자는 제품에 대한 사용방법 및 주의사항을 완전히 숙지 후 사용해야 하며, 충분한 교육을 받거나 숙련된 시술자만이 사용해야 합니다.
 - 2) 사용목적 이외의 용도로 사용해서는 안 됩니다.
 - 3) 본 제품은 비멸균 제품이므로 사용 전에 반드시 멸균 후 사용하여야 합니다.
 - 4) 당사에서 제시하는 멸균조건 이외의 방법으로 멸균하거나 부적절하게 취급하여 발생한 제품의 손상에 대하여 제조사는

책임을지지 않습니다.

- 나. 경고 및 금기사항
1. 경고
- 안전하고 효과적인 사용을 위해 다음을 강력히 권장한다.
- 1) 제품의 사용 목적 이외 용도로 사용하거나 제품을 변형하여 사용하지 않습니다.
 - 2) 기타 수술에 적합하지 않은 환자에게는 사용하지 않습니다.
 - 3) 제품의 손상이나 변형을 방지하도록 주의 깊게 취급해야 합니다.

- 다. 부작용
- 제품의 사용 및 보관 등에 의한 부주의로 인한 감염 및 금속 알레르기 등의 반응을 일으킬 수 있습니다.

IFU-DS-I-3500T(Rev.1)/ 26-08-26